

Cum se interpreteaza rezultatul:

Fig. 1 Rezultat normal



Daca suprafata de reactie s-a colorat in totalitate in culoarea roz, starea si functia de aparare si protectie a pielii sunt intacte.

Fig. 2 Disfunctie / Rezultat anormal



Daca suprafata de reactie ramana albastra, neschimbata, exista tulburari ale functiei de protejare a pielii. Pielea este (prea) uscata, nu este elastica si nu

poate fi suficient solicitata mecanic. Aceasta stare trebuie sa o comunicati medicului dumneavoastra pentru a primi sfaturi cu privire la ingrijirea pielii si pentru a evita aparitia sindromului piciorului diabetic.

Fig. 3 Disfunctie / Rezultat anormal



Daca sunt doar suprafete mici ale compresei (zona de reactie) colorate in roz, restul suprafetei ramanand albastra, gradul de solicitare a pielii talpii

este limitat. Si aceasta stare trebuie sa o comunicati medicului dumneavoastra.


Frecventa de efectuare a testului:

Se recomanda repetarea periodica a testului cu neuropad® la intervale de 6 luni.

Contraindicatii:

- Inflamatii locale, rani sau alte stari patologice ale suprafetei pielii destinata testului (abcese, ulceratii, plagi deschise).
- A nu se utiliza in caz de alergii la crom, nichel sau cobalt sau alte material care intra in structura testului asa cum a fost descris anterior

neuropad®

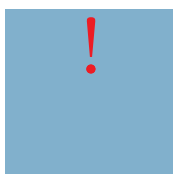

Distributor:

IMP GmbH Gewerbepark Lindach D3
D-84489 Burghausen/Germany
Tel.: +49 (0) 8677-9841-0
Fax: +49 (0) 8677-9841-50
E-Mail: johann.bubitsch@impgmbh.info
www.neuropad.de

Producator:

miro Verbandstoffe GmbH
D-51674 Wiehl/Germany

Indicatii generale pentru ingrijirea picioarelor:

- Folosirea unei spume pentru picioare cu continut bogat de uree (neuropad + foot-care)
- Controlarea intensiva zilnica a picioarelor

www.neuropad.de

neuropad®

Dispozitiv medical pentru testarea neuropatiei autonome periferice - SINDROMUL PICIORULUI DIABETIC

Instructiuni de utilizare

Stimati pacienti,
Va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni, ele contin informatii importante despre neuropad® si modul sau de utilizare. Daca aveti intrebari, va rugam sa va adresati medicului sau farmacistului dumneavoastra.

neuropad®

Este un dispozitiv medical pentru testarea neuropatiei autonome periferice al carui principiu de functionare se bazeaza pe determinarea gradului de perspiratie a glandelor sudoripare de la nivelul pielii talpii, metoda demonstrata clinic in practica medicala pentru a autocontrolul pacientilor diabetici.

Continutul setului:

Hirtie de sigiliu:

Hirtie pergament opaca 40g/m²

Material de suport:

Pelicula subtire, transparenta de poliolefina (modificata pentru uzul medical) care se muleaza perfect pe talpa piciorului.

Adeziv:

Polyacrylat medicinal, hipoalergen

Compresa indicatoare:

100% vascoza intarita cu material de legatura, impregnata cu solutie de clorura de cobalt (II)

Masuri generale de precautie:

- A se folosi exclusiv pentru uz extern
- A se evita orice contact cu ochii, caile respiratorii sau plagi

- A nu se lasa la indemina copiilor
- Zona de reactie a testului trebuie sa vina in contact doar cu suprafata pielii consultata/destinata testului (talpa)

Instructiuni de utilizare:

Va rugam sa cititi cu atentie!

- a) Se recomanda efectuarea testului la ambele picioare. In acest scop, setul neuropad® contine doi plasturi. Se scot plasturii neuropad® din ambalaj numai inainte de utilizare.
- b) Controlati daca suprafata de reactie este de culoare albastru intens inainte de testare (vezi fig. 2).
- c) Testul indicator se utilizeaza (se lipeste) exact ca orice tip de platură (leucoplast) folosit la rani.
- d) Asteptati 5 minute de la descaltarea pantofilor si a sosetelor inainte de inceperea testului pentru a evita influentele negative datorate transpiratiei piciorului.

Plasturele neuropad® se aplica pe zona intacta a talpii, sub degetul mare (vezi ilustrarea) sau sub degetul mic; alegeti zona cu cele mai putine neregularitati sau bataturi. Pe perioada desfasurarii testului, tineti picioarele sus si asigurati-va ca neuropad®-ul nu vine in contact cu umiditatea exterioara. In nici un caz, neuropad®-ul nu trebuie sa ajunga in contact cu pielea lezata sau inflamata.

Interpretarea testului

Dupa 10 minute, indepartati neuropad®-ul fara sa atingeti zona de reactie. Culoarea zonei de reactie indica rezultatul testului (vezi fig. 1 si 2).

Apoi pliati spre mijloc cele doua parti laterale ale peliculei suport pentru a sigila ermetic zona de reactie. Dupa terminarea testarii, indepartati urmele de adeziv de pe piele cu ajutorul servetelului de curatare aflat in set si spalati-va pe maini.